


グローブタイプ

装着方法

- 1, LRの表記を確認する



- 2, ふくらはぎの中心とゲルサポの三角切り込み部を合わせる

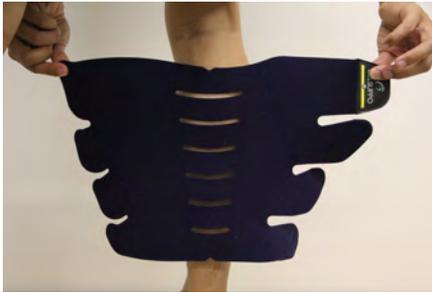

- 3, 一番上の留め具を仮留めする



- 4, 一番下から順に締めていく



- 5, 一番上の仮止めを締め直す




脱着方法

- 1, ゲルサポを取り外す



- 2, 芯棒に巻きつける

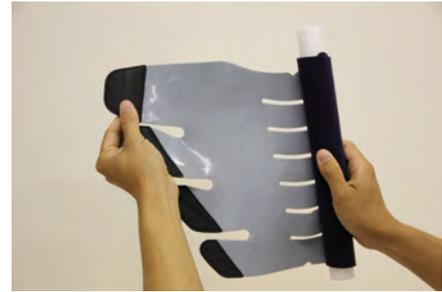

- 3, 巾着袋に収納する



装着時の注意点

- ・痛みが出るほど強く巻かないでください
- ・ゴミがつくため粘着面を地面に付けないでください
- ・密着力が落ちる事があるため、汗を拭き取ってから装着してください

使用時の注意点

- ・肌荒れしやすい人は使用を避けるか、もしくは短時間から少しずつ時間を延ばしてご使用ください
- ・時間が経つとゲル面が黄色く変色することがありますが、性能に影響はございません
- ・水洗いだけの場合、皮脂などの汚れが落ちず粘着力が低下する事があります