

テープタイプ

装着方法

- 1, LR の表記を確認する



- 2, 足首上で曲線部を水平に合わせる



- 3, テーピングのように巻き上げる



- 4, 反射テープを目立つところに貼る



装着時の注意点

- ・痛みが出るほど強く巻かないでください
- ・ゴミがつくため粘着面を地面に付けないでください
- ・密着力が落ちる事があるため、汗を拭き取ってから装着してください

脱着方法

- 1, 反射テープを剥がす



- 2, タグ部を確認する



- 3, 巻き上げる



- 4, 最後に反射テープで留める



使用時の注意点

- ・肌荒れしやすい人は使用を避けるか、もしくは短時間から少しずつ時間を延ばしてご使用ください
- ・時間が経つとゲル面が黄色く変色することがありますが、性能に影響はございません
- ・水洗いだけの場合、皮脂などの汚れが落ちず粘着力が低下する事があります